



# Biodent EC40 tandvernis

## Ondersteunt een gezond milieu in de mond

### Wanneer gebruiken?

Biodent oral care products gebruiken bij frequent eten van zoetigheid.

### Hoe vaak gebruiken?

Gebruik Biodent chloorhexidine vernis om de 3 maanden.

### Samenstelling

Chloorhexidine, sandarac en ethanol.

### Niet gebruiken

Bij overgevoeligheid voor chloorhexidine of een van de andere ingrediënten.

[www.biodent.nl](http://www.biodent.nl) • [info@biodent.nl](mailto:info@biodent.nl)

BIODENT BV • Mollevite 19 • 6931 KE Westervoort  
Nederland • T 0031 6 20143120





## Gebruiksaanwijzing


Met een stompe naald een dunne laag aanbrengen op het tandoppervlak dat moeilijk schoon te maken is met tandenpoetsen. Vermijd contact van de vernis met de tong, chloorhexidine tandvernis smaakt bitter. Gebruik niet meer dan  $\frac{1}{4}$  spuitje per keer.



1 Aanbrengen op de tandhals



2 Aanbrengen op het kauwvlak

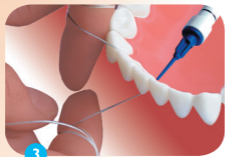

3 Aanbrengen tussen de tanden, flossen



4 5 minuten niet eten en drinken en daarna de vernis wegpoetsen met een tandenborstel. Kleine stukjes uitspugen.

