

GEBRAUCHSANWEISUNG

Biodent TS

PFLANZLICHES PRODUKT

TEMPORÄRE ZAHNVERSIEGELUNG AUF
DER BASIS VON PFLANZLICHEM HARZ



Benutzen Sie Biodent TS bei einem erhöhten Kariesrisiko: wenn Sie häufig Zucker konsumieren oder in der letzten zwei Jahren Zahnkaries hatten. Bei der Verwendung von Biodent TS wird die Wahrscheinlichkeit einer Zahnfleischentzündung reduziert.

Einmal pro Woche für maximal vier Wochen anwenden.

Biodent BV

Molle vite 19 • 6931 KE Westervoort • Nederland

www.biodent.nl • info@biodent.nl


→ Die Verschlusskappe der Spritze aufdrehen → Den beigefügten Aufsatz auf die Spritze setzen → Auf die von Zahnbelag und Speiseresten gereinigte Zahnoberfläche auftragen. Dort auf die Zahnoberfläche auftragen, wo der Zahnbelag mit der Zahnbürste nur schwierig zu entfernen ist.



1
An den Zahnhälsen auftragen



2
Auf den Kauflächen auftragen

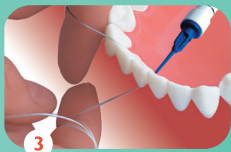

3
In den Zahnzwischenräumen verteilen und Zahnseide anwenden



4
5 Minuten lang nichts essen oder trinken, danach die Zähne putzen und die kleinen Stückchen ausspucken. Der sichtbare Zahnlack, der nicht weggeputzt werden kann, löst sich in ein paar Stunden auf. Sanft putzen, damit das Zahnfleisch nicht beschädigt wird.

→ Nach der Anwendung den Aufsatz von der Spritze entfernen und die Spritze mit der Verschlusskappe verschließen. Eine unsichtbare Zahnlack-schicht bleibt in den Poren auf der Zahnoberfläche zurück, löst sich dann allmählich auf und wirkt antibakteriell.